

Název výrobku: Gel na popáleniny WATER JEL
Firemní označení: GNP080, GNP120, GNP240
Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava-Třebovice
tel.: 596 966 455 fax: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Jak WATER JEL gel funguje:

- **Chladí, působí proti bolesti, desinfikuje, snižuje otok, vyživuje a kryje ránu, urchluje hojení, neštípe,** zabraňuje přilnutí krytí na ránu, zmírňuje následky popálenin, urychluje obnovu poškozené kůže.
- **Vhodný na všechny typy popálenin z různých příčin** (od ohně, horkých tekutin a pevných látek, slunce), od malých, po rozsáhlé opoáleniny všech stupňů.
- **Průhledná gelová konzistence** umožňuje snadné bezbolestné nanesení na ránu i kontrolu rány pod gelem.
- **Chladí i bez lednice** - chladivý efekt gelu funguje i v případě, kdy je lahvička s gelem uložena při pokojové teplotě. Gel tedy může být umístěn i v lékárnice, bez nutnosti využívat lednici.
- Praktické 80ml balení můžete mít stále u sebe
- **Gel je velmi dobře snášen - lze použít pro dospělé i děti,** nejsou známe alergické a jiné vedlejší nežádoucí účinky, bez barviv, lehce voní čistotou po desinfekčních složkách gelu, nezanechává skvrny na oděvech.

Balení: 80 , 120 a 240 ml lahvička s dávkovačem

Typ záchranařů: *Pod uzávěrem je z výroby bezpečnostní kovový uzávěr jako např. u zubní pasty, který je vhodné hned odstranit a lahvičku mít tak s dávkovačem připravenou pro okamžité použití při popálenině. Dodatečné ostraňování bezpečnostního uzávěru zbytečně prodlužuje čas, než je gel použit na popáleninu. Dobře uzavřená lahvička vč. dávkovače i bez bezpečnostního uzávěru dostatečně chrání obsah balení, gel nevysychá a je okamžitě připraven k použití. Pamatujte: U popálenin jde o čas!*

Aplikace: na drobné popáleniny např. dotek o varnou plochu, žehličku, stříknutí kapky oleje naneste dávkovačem hrášek gelu, který nevtírejte a nechejte ve vrstvě působit. Při velkých popáleninách např. celá ruka, polítní horkou tekutinou otevřete uzávěr lahvičky a aplikujte 1mm silnou vrstvu gelu na celou popáleninu - nevtírat. Při popáleninách od slunce naneste gel jemným natřením na popálenou kůži a pocítíte okamžitou úlevu, nevznikne tak masivní otok a tím ani nedochází k tak velkému popraskání kůže a následnému loupání po spálení, působí proti bolesti, chladí, vyživuje.

Toxicita: materiály jsou netoxické

Záruka: 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 11. 5. 2018:

Ing. Ondřej Stoniš

