

TECHNICKÁ DATA**OSV02**

Název výrobku: Láhev na vyplachování očí s fyziologickým roztokem 0,25 l - zelená (Ø 5 cm x 25,5 cm)

Firemní označení: OSV02

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: plastová nádoba přizpůsobená k okamžitému výplachu očí

Doporučené užití: výplach očí zasažených agresivní látkou
Obsah lahve o objemu 250 ml vystačí na cca 2 min. intenzivního vyplachování

- Ergonomicky tvarovaná oční miska pro otevření očního víčka
- Sterilní roztok NaCl 0,9%, bez pyrogenů na mytí a vyplachování v láhvi z recyklovatelného polyetylenu

po otevření se musí kapalina vyprázdnit, nelze dále skladovat otevřenou nádobku se zbytkem roztoku, jedná se o sterilní kapalinu, která po otevření ztrácí svou sterilitu = na jedno použití

Návod:

1. oční nálevku nasadíte na láhev
2. otočením o 180° uvolněte plastový uzávěr
3. nálevku přiložte na postižené oko
4. tlakem na lahev vyplachujte do vyprázdnění

Expirační doba: 2½ roku

Technické údaje:

rozměry (cm)	Ø 50 x 255mm
objem (l)	0,25
materiál	PE

Ochrana zdraví: výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný.

Záruka: 30 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací s výrobkem.

Skladování: Skladujte v původním obale, v neotevřeném a nepoškozeném stavu a na suchém místě při teplotě 5 - 25° C. Křehnutí materiálu a plastového obalu zabráníte tím, že nebudete výrobek vystavovat slunečnímu svitu ani UV záření.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

V Ostravě dne 5. 11. 2014

Ing. Ondřej Stoniš

