

**TECHNICKÁ DATA****OSV05****Název výrobku:** Lahev na vyplachování očí s fyziologickým roztokem 0,5 l**Firemní označení:** OSV05**Dodavatel:** **REO AMOS, spol. s r.o.**  
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava - Třebovice  
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460  
E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)  
[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)**Technický popis:** plastová nádoba přizpůsobená k okamžitému výplachu očí**Doporučené užití:** výplach očí zasažených agresivní látkou  
Obsah lahve o objemu 500 ml vystačí na cca 4 min. intenzivního vyplachování  

- Ergonomicky tvarovaná oční miska pro otevření očního víčka
- Sterilní roztok NaCl 0,9%, bez pyrogenů na mytí a vyplachování v láhvi z recyklovatelného polyetylénu

po otevření se musí kapalina vyprázdnit, nelze dále skladovat otevřenou nádobku se zbytkem roztoku, jedná se o sterilní kapalinu, která po otevření ztrácí svou sterilitu = na jedno použití**Návod:**

1. oční nálevku nasadíte na láhev
2. otočením o 180° uvolněte plastový uzávěr
3. nálevku přiložte na postižené oko
4. tlakem na lahev vyplachujte do vyprázdnění

**Expirační doba:** 2½ roku**Technické údaje:**

rozměry (cm)	Ø 65 x 270mm
objem (l)	0,5
materiál	PE

**Ochrana zdraví:** výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný. Tento produkt je v souladu se směrnici 93/42/EHS, příloha II, bod 3.2 – značka CE 0123 - Klasifikace: IIa**Záruka:** 30 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací s výrobkem.**Skladování:** Skladujte v původním obale, v neotevřeném a nepoškozeném stavu a na suchém místě při teplotě 5 - 25° C. Křehnutí materiálu a plastového obalu zabráníte tím, že nebudete výrobek vystavovat slunečnímu svitu ani UV záření.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

---

V Ostravě dne 5. 11. 2014

Ing. Ondřej Stoniš

